

## Postup při testování LEPU testy

- Zde je srozumitelně zpracovaná problematika testování ve školách. Doporučuji Vám se zde trochu rozhlédnout <https://testovani.edu.cz/>
- Do MŠ jsme přijali LEPU testy.
- **Prosím všechny rodiče, aby se s dítětem podívali na toto video** <https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=2s>
- Domluvte se s dítětem, jak test provedete (dítě samo x vy dítěti).

### Postup:

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.  
LEPU test:
4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
  - Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.
  - Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
  - Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
  - otevírá vyhodnocovací kartu,
  - vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
  - odstraňuje lepicí proužek,
  - dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
  - otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
6. Dohlížející osoba (zákonný zástupce) spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut